



ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОСТОВЕРНОГО И ИНФОРМАТИВНОГО РЕЗУЛЬТАТА НЕОБХОДИМО ПРОВОДИТЬ ОТБОР ПАТОЛОГИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА СОГЛАСНО СОПРОВОДИТЕЛЬНОМУ ДОКУМЕНТУ И НИЖЕ УКАЗАНЫМ ПРАВИЛАМ!

СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ

1. Название хозяйства _____
2. Область _____
3. Район _____
4. Телефон (указать код населенного пункта) _____
5. Факс (указать код населенного пункта) _____
6. e-mail _____
7. Контактна особа (ФИО) _____
8. Вид погибшего животного или кросс птицы _____
9. Возраст животного _____
10. Дата отбора патматериала _____
11. Количество проб _____

12. Для исследования направляются органы (необходимое отметить):

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Сердце | <input type="checkbox"/> |
| Печень | <input type="checkbox"/> |
| Селезёнка | <input type="checkbox"/> |
| Почки | <input type="checkbox"/> |
| Желудок железистый и мышечный | <input type="checkbox"/> |
| Кишечник (тонкий отдел) | <input type="checkbox"/> |
| Кишечник (толстый отдел) | <input type="checkbox"/> |
| Мозг (с мозжечком) | <input type="checkbox"/> |
| Лёгкие | <input type="checkbox"/> |
| Трахея (от гортани до бифуркации) | <input type="checkbox"/> |
| Нервы периферические | <input type="checkbox"/> |
| Мышца бедра | <input type="checkbox"/> |
| Пищевод | <input type="checkbox"/> |
| Бурса (до 120 дня жизни) | <input type="checkbox"/> |

Другое _____

11. Анамнез

- Клиническая картина:

- Патанатомические изменения

- Проведённые вакцинации/медикаментозные обработки

Подпись _____

« _____ »

_____ 20__ г.



ПРАВИЛА ОТБОРА ПАТОЛОГИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

1. Отбираемый материал должен быть свежим (**не автолизным, не замороженным**).
2. Отбирая кусочки, необходимо учитывать микроскопическое строение данного органа или ткани. Например, кусочки из почки отбирают с таким расчетом, чтобы в них попали корковое и мозговое вещества, с этой целью разрезы делают перпендикулярно к поверхности.
3. Из паренхиматозных органов (печень, селезенка) кусочки необходимо отбирать с капсулой.
4. Стенки полостных органов отбирают поперечными срезами.
5. Объекты из патологически измененных тканей (опухоли, язвы) вырезают на границе с нормальными частями, чтобы были захвачены здоровые и измененные части.
6. Для повышения достоверности результата при оценке патогистологических изменений материал следует отбирать не менее чем от двух-трех животных (от каждого животного в отдельную емкость).
7. Отбор патматериала необходимо производить острыми инструментами (бритва, скальпель, острые ножницы).
8. **Размер** отбираемых **кусочков 1-2 см**.
9. Отобранные кусочки органов необходимо сразу перенести в фиксирующее вещество (**10 % раствор формалина**), причем объем фиксирующей жидкости должен превышать объем органов не меньше чем в 5 раз.